


GEBRAUCHSANWEISUNG

Gallendrainagebeutel

Auffangbeutel 1500 ml

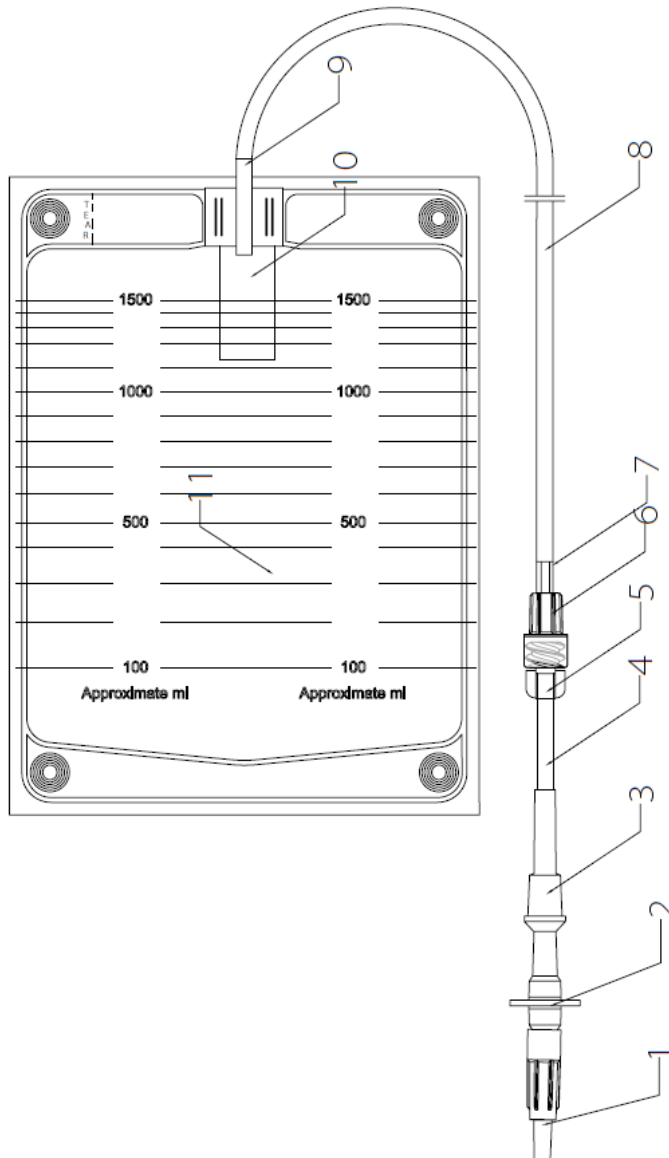

Gallendrainagebeutel (REF 690630)

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 1 | Konnektor |
| 2 | Konnektor, zweiseitig |
| 3 | Gummiverbindung |
| 4 | Schlauch |
| 5 | Schlauchverbindung mit Flügel-Griff |
| 6 | Luer-Lock-Konnektor, männlich |
| 7 | Schlauchverbindung |
| 8 | Schlauch |
| 9 | Schlauchverbindung |
| 10 | Rückflusssperre (NRV) |
| 11 | Beutel |

Produktbeschreibung

Der Gallendrainagebeutel 1500 ml ist ein Auffangbeutel für Gallensekrete aus der (Schwerkraft-) Drainage post-operativer Wunden. Er verfügt über eine Rückflusssperre, einen männlichen Luer-Lock-Konnektor sowie über einen zusätzlichen Spezialkonnektor.

Das Produkt besteht aus den Materialien

- PVC (Bauteile 2, 5, 7-11)
- ABS (Bauteile 1, 6)
- ME-103 (Bauteil 4)
- IR (Polyisopren, Bauteil 3)

Anwendungsgebiete

Der Gallendrainagebeutel 1500 ml wird eingesetzt für das Auffangen von Gallensekret aus der (Schwerkraft-) Drainage post-operativer Wunden.

Kontraindikation

Der Gallendrainagebeutel 1500 ml darf nicht verwendet werden

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien
- zur Ausleitung von Flüssigkeit aus dem Pleura-Spalt

Anwendungshinweis

1. Sterile Entnahme des Gallendrainagebeutels 1500 ml aus der Verpackung.
2. Drainageschlauch mit Überleitungsschlauch des Gallendrainagebeutels 1500 ml über männlichen Luer-Lock-Konnektor fest verbinden.
3. Beutel vertikal und unter Gallenblasenniveau des Patienten am Bett befestigen.

Nach Füllung ist der Austausch des Beutels erforderlich.

Die Verweildauer des Gallendrainagebeutels 1500 ml beträgt fünf bis maximal sieben Tage, der Anweisung durch den behandelnden Arzt unterliegend.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Nicht zu verwenden in Kombination mit Produkten zur Pleura-Punktion.

Entsorgung

Nach Gebrauch kann dieses Produkt eine biologische Gefährdung darstellen.

Die Entsorgung muss mit Sorgfalt und entsprechend den Verordnungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz erfolgen, um die potentielle Gefahr von Infektionen zu vermeiden.

Sonstige Hinweise

Der Gallendrainagebeutel 1500 ml ist ein steriles Produkt (EO).

Der Gallendrainagebeutel 1500 ml ist nicht geeignet für die Wiederverwendung, da diese zum Versagen des Produktes oder zur Gefährdung des Patienten durch Infektion führen kann.

Nach Ablauf des angegebenen Verfallsdatums darf der Gallendrainagebeutel 1500 ml nicht mehr eingesetzt werden.

Der Gallendrainagebeutel 1500 ml ist bei Temperaturen von +5°C bis +30°C lichtgeschützt, trocken und sauber aufzubewahren.

Der Gallendrainagebeutel 1500 ml ist direkt nach dem Öffnen der unbeschädigten Verpackung zu verwenden.

Die Haltbarkeit des Gallendrainagebeutels 1500 ml beträgt 5 Jahre.

Lieferform und Packungsgröße

REF	Name	Schlauchlänge [cm]	VE [ST]
690630	Gallendrainagebeutel 1500 ml	90	25

Sterilität

Der Gallendrainagebeutel 1500 ml ist einzeln steril verpackt (EO).

Die Sterilität wird gewährleistet, solange die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt ist.

Stand der Information

11/2020














Revisions-Status

Rev0_11 2020

Hersteller

ASID BONZ GmbH
 Hertzstr. 3
 71083 Herrenberg
 Deutschland
 Tel.: +49 (0)7032 9562 0
info@asid-bonz.de

Verpackungssymbole

Symbol	Bedeutung
	Hersteller
	Artikelnummer
	Chargenbezeichnung
	Herstelldatum
	Verwendbar bis
	Sterilisation mit Ethylenoxid
	Nicht wiederverwenden
	Nicht verwenden, falls Verpackung beschädigt
	Lagertemperatur +5 bis +30°C
	Vor Hitze schützen
	Vor Nässe/ Feuchtigkeit schützen
	Enthält keinen Naturkautschuklatex
	CE-Zeichen und Identifikationsnummer der benannten Stelle. Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie des Rates über Medizinprodukte 93/42/EWG